



MANGO KEELER DE BOLSILLO

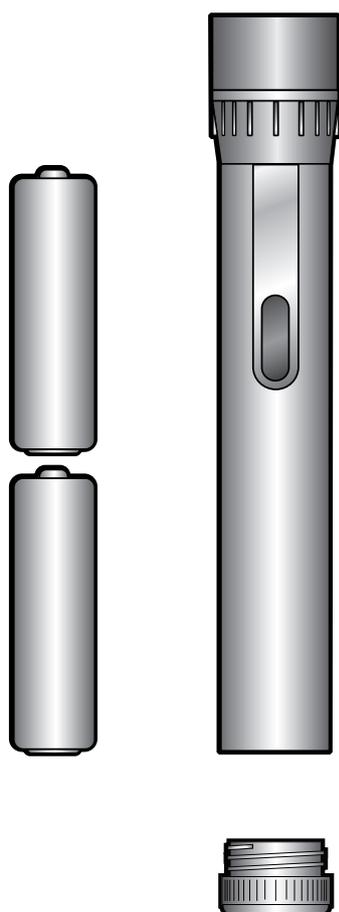

**POR FAVOR, LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
CUIDADOSAMENTE**

 **Keeler**

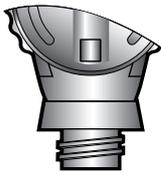

Conexión de los cabezales de los instrumentos a los mangos.

La conexión entre el cabezal del instrumento y el mango es de rosca. Para conectar el cabezal de nuestro instrumento, conecte como se muestra y gire en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese que la conexión entre el cabezal y el mango es positiva.



Compatibilidad

Los oftalmoscopios Keeler especialista, profesional, estándar y de médico y los retinoscopios Keeler son compatibles con los mangos Keeler Vista 2,8v y los Keeler 3,6v.



APAGADO ENCECDIDO

Control del brillo, encendido/ apagado

Para encender el instrumento haga girar el control del brillo como se indica hacia la derecha. Para apagar el instrumento haga girar el control del brillo como se indica hacia la izquierda.

Insertar/ cambiar las pilas

Destornille la tapa de las pilas, introduzca las pilas y cambie la tapa de las pilas como se muestra.

Deben utilizarse las siguientes pilas secas:

Mango Keeler de bolsillo - 2 pilas secas de 1,5v de tamaño AA - Duracell MN 1500 o equivalentes.

Instrucciones de limpieza

El instrumento sólo debe limpiarse de forma manual sin sumergirlo en ningún líquido, de la siguiente manera:

1. Frote la superficie externa con un paño absorbente limpio, que no derrame, humedecido con agua / una disolución de detergente (2% por volumen) o agua / una disolución de alcohol isopropílico (70% por volumen).
2. Asegúrese de que la disolución sobrante no entra en el instrumento. Tenga cuidado en que el paño no esté empapado de disolución.
3. Las superficies deberían secarse a mano cuidadosamente usando un paño limpio que no derrame.
4. Deshágase con seguridad de los materiales de limpieza utilizados.

Garantía y reparación

No contiene componentes que el usuario pueda utilizar – todo el mantenimiento preventivo y reparación debe ser realizado por representantes autorizados por Keeler.

El mango Keeler tiene una garantía de 3 años y se cambiará o reparará gratuitamente cuando:

1. Se produzca cualquier fallo debido a una fabricación defectuosa.
2. La prueba de compra acompañe cualquier reclamación

FABRICADO EN EL REINO UNIDO POR:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tel: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

Teléfono gratuito: 0800 521 251

DISTRIBUIDO POR:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Gratuito: 1 800 523 5620

Tel: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

'La marca CE que aparece
en este producto indica que
ha sido probado y se
adecua a las disposiciones
de la Directiva 93/42/CEE
sobre dispositivos médicos'



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distribuidor