



# POIGNÉE DE POCHE KEELER

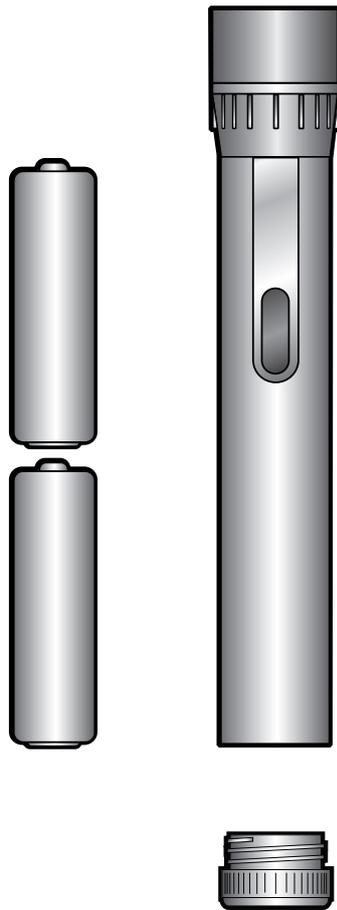

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION

 Keeler

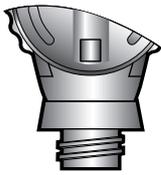

### **La mise en connexion de la tête de l'instrument à la poignée.**

La mise en connexion de la tête de l'instrument à la poignée est un filetage cylindrique. Pour relier la tête de l'instrument, suivez la procédure, et faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez que la connexion entre la tête et la poignée est correcte.



### **Compatibilité**

Les ophtalmoscopes spécialiste, professionnel, standard et praticien Keeler tout comme les rétinoscopes Keeler sont compatibles avec Keeler Vista 2,8v et la poignée Keeler 3,6v.

MARCHE      ARRÊT

### **Contrôle de luminosité "Marche/Arrêt"**

Pour allumer l'instrument, tournez le bouton de contrôle de luminosité vers la droite comme indiqué. Pour éteindre l'instrument, tournez le bouton de contrôle de luminosité vers la gauche comme indiqué.

### **Insertion / remplacement des piles**

Dévisser le couvercle de la batterie, insérez les piles et remplacez couvercle de la batterie comme indiqué. Les piles sèche suivantes devraient être utilisées:

**Poignée de poche Keeler** : 2 piles sèches de 1,5v de format AA, Duracell MN 1500 ou équivalent.

### **Instructions d'entretien**

Pour l'entretien de l'appareil, effectuer les opérations de nettoyage à la main, sans immersion, comme décrit ci-dessous :

instrument :

1. Essuyer la surface extérieure avec un chiffon propre, absorbant et ne laissant pas de fibres textiles, humidifié avec un mélange eau/détergeant (2 % par volume) ou eau/alcool isopropylique (70 par volume).
2. Ne pas laisser entrer trop de mélange dans l'appareil. Faire attention à ce que le chiffon ne soit pas trop imbibé de mélange.
3. Les surfaces doivent être séchées à l'aide d'un chiffon propre ne laissant pas de fibres textiles.
4. Ne pas jeter n'importe où les tissus utilisés pour le nettoyage de l'appareil.

### **Garantie et entretien**

Les pièces ne sont pas réparables : tout entretien et maintenance préventive doivent être effectué par les représentants autorisés par Keeler.

Le Poignée Keeler est garanti 3 ans et sera remplacé ou réparé sans frais selon les conditions suivantes :

1. la panne est due à un défaut de fabrication
2. Une preuve d'achat doit accompagner toute réclamation

FABRIQUÉ AU R.U. PAR :

**Keeler Limited**

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

Angleterre

Tél. : +44 (0)1753 857177

Fax : +44 (0)1753 827145

Numéro Vert : 0800 521 251

DISTRIBUE PAR:

**Keeler Instruments Inc**

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Numéro Vert : 1 800 523 5620

Tél.: 610 353 4350

Fax : 610 353 7814

La marque CE sur ce produit   
indique qu'il a été soumis à des   
essais conformément à la   
disposition dans la directive   
93/42/EEC sur les instruments   
médicaux et qu'il est conforme à   
cette disposition.



— A —  
HALMA GROUP  
C O M P A N Y



**Distributeur**